



MASCHERINE riutilizzabili (in CZ da 5 pezzi) cod.73510

made in Italy

€ 11,25/conf.

Da 10 CZ € 11,25 - sc.10%

COME SANIFICARE LE MASCHERINE RIUTILIZZABILI IN TESSUTO (COTONE O ELASTAM)

- Diluire 2 cucchiaini di candeggina in 1 litro di acqua (corrisponde ad una soluzione di ipoclorito di sodio allo 0.5%). Ideale è usare acqua calda a 40°C.
- In alternativa, soprattutto per mascherine nere o colorate che potrebbero scolorire, le mascherine si possono immergere in alcool ad almeno il 70%.
- Si raccomanda di lasciare le mascherine in bagno nella soluzione calda per almeno 10 minuti.
- Asciugare le mascherine in ambiente areato.
- Si raccomanda di stirare le mascherine a 80-100°C per completare l'asciugatura.



Ricordiamo che le mascherine limitano il contagio SOLO SE:

- 1) Vengono lavate dopo ogni giornata di utilizzo
- 2) Vengono utilizzate asciutte
- 3) Viene coperto anche il naso
- 4) Viene rispettata la distanza di almeno 1 metro

Dati identificativi Articolo

	Codice articolo	MY2T30-50	Dimensioni (in mm)		
	Articolo	Mascherina monouso	size	Lungh max	larg ± 3
	Caratteristiche	Con lacci	UNICA	200	110
	Sterilizzazione	Non sterile	Smaltimento prodotto		
	Peso unitario	15 g	Raccolta INDIFFERENZIATA		
	Strati	3 (1 in cotone + 2 in TNT)			
	Materia prima	Cotone + TNT			

Caratteristiche materia prima

	Composizione strato 1	96 % Cotone; 4% Elastan	
	Grammatura	210 g/m ²	
	Composizione strato 2	100% Polipropilene	
	Grammatura	30 g/m ²	
	Composizione strato 3	100% Polipropilene	
	Grammatura	30 g/m ²	

Strato 1

Strati 2-3

Caratteristiche Confezione

	Pezzi per confezione	5	Misure confezione		
	Tipo confezione	busta	lung cm	larg cm	alt cm
	Materiale confezione	Plastica PE	23	23	6
	Testi su confezione	Etichetta informativa	Volume: m³ 0,003		
	Peso confezione (tara)	2 g	Smaltimento confezione		
	Peso lordo confezione	752 g	Raccolta PLASTICA		

Altre informazioni



Dispositivo Medico in classe I
Reg. (UE) 745/2017
Direttiva 93/42/CEE



Made in Italy